

A maszk légzésvédelemre használatos, tökéletesen alkalmazkodik az arc formájához, könnyed légzést biztosítva. Valamint hatékony szűrőgátat képez.

Használati utasítás:



A maszk felhelyezése előtt mossunk kezet!

A maszkot a száj és az orr fölé kell rögzíteni, az alábbiak szerint:

Rögzítse a maszkot, ügyelve arra, hogy az elasztikus szalag az arc közepén legyen;

Nyomja meg a rugalmas szalagot úgy, hogy az az orr alakjához idomúljon;

Helyezze el a maszkot az arcon és az áll alatt, hogy kényelmes legyen.

Ajánlások a maszk viselésének periódusára:

Ne érintse meg a maszkot kézzel;

Ha azonban megérintette a maszkot, mosson kezet meleg szappanos vízzel vagy alkohol alapú fertőtlenítőszerrel;

Cserélje le a maszkot, amikor nedves lesz. Ha benedvesedik elveszíti hatékonyságát.

Gyártó:

Anji SPENQ Industrial Co., Ltd.

Address: F16, Building C, Anji Chamber of Commerce Mansion, No. 99 Tianhuangping
South
Road, 313300 Anji County, Zhejiang Province, People's Republic of China
Tel: 0086-572-5882801 Fax: 0086-572-5676519

STANDARD:EN14683:2019